


JERINGA INFINITA 10 ML

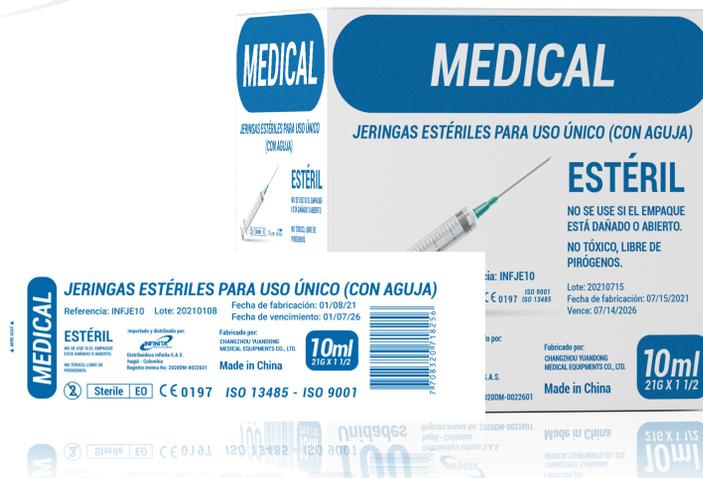

 <p>Referencias INFJE10</p>	 <p>Presentación 10 ml</p>	 <p>Embalaje 100 und x caja</p>
---	--	--

La jeringa desechable 10 ml es un dispositivo completamente estéril hecho para un solo uso, su estructura básicamente consiste en un tubo hueco de polipropileno transparente con un émbolo en su interior que aspira o impele el líquido, según el movimiento que se le dé, además viene con un extremo terminado con conexión luer lock donde se introduce la aguja. La jeringa desechable 10 ml se inserta (si aplica) para realizar extracción de líquidos o administración de medicamentos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Jeringa estéril, de un solo uso, atóxica con un pico que garantiza conexiones seguras y sin fugas.
- Cilindro transparente y siliconizado, que proporciona un deslizamiento suave.
- Brida cilíndrica de forma anatómica para apoyo de los dedos que proporciona estabilidad a la jeringa cuando se encuentra sobre una superficie plana.
- Escala externa precisa y visible.
- El émbolo cónico no se desengancha del cilindro debido al anillo de retención y tiene ramas en su base para facilitar la aplicación sin deslizamiento de los dedos.
- Envases individuales con sellado eficiente que garantiza la integridad del producto hasta el momento de su uso, permite abrir y transferir con técnica aséptica,
- Trae en su exterior los datos de identificación, origen, número de lote, fecha de validez.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cono de acoplamiento luer lock
- Cuerpo cilíndrico en polipropileno traslúcido.
- Alas de sujeción embolo: Pistón, Disco de empuje, Escala volumétrica
- Aguja acero inoxidable
- Conexión luer lock
- Vida útil 5 años
- Certificación ISO9001
- Certificación ISO13485
- Ce0197



MODO DE USO:

- Realizar técnica de lavado de manos según corresponda.
- Usar guantes exámenes o según corresponda.
- Comprobar de la vigencia del producto.
- Verificar el sellado del empaque.
- Abrir el empaque secundario separando por donde se indica.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Conservar el producto en el empaque original.
- No almacenar ni utilizar este producto si está vencido.
- Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C.
- Humedad relativa permanente: máximo 70%.
- Los estantes donde se almacene este producto deben estar 30 cm alejados del piso.
- El empaque del producto se verá afectado si lo expone a luz solar o luces brillantes por encima de 400W.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:

- Antes de su uso, realizar el desbloqueo de la jeringa: Presionar el émbolo (simulando el movimiento de inyección) hasta el final para sacar el aire.
- No tirar el émbolo antes de utilizar la jeringa, ya que la aspiración, además de provocar una posible contaminación del producto por el aire ambiente, si se realiza antes de presionar el émbolo, puede forzar el tapón y, en ocasiones, provocar una ligera deformación.
- Durante la aspiración o inyección de líquidos, la jeringa no debe ser sostenido por el cilindro (cuerpo), y si por la empuñadura (aleta). Al sujetar el cilindro, puede sufrir una ligera deformación y provocar fugas.
- Nunca utilice productos de uso manual en bombas de infusión.

NOMBRE DEL IMPORTADOR: Distribuidora Infinita SAS

CÓDIGO: 900362719

REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2020DM-0022601